

3) CHOIX DU MATERIEL

Extrait C2-MO01/C2-INS01/C2-INS22

Pour les prélèvements sanguins (C2-MO01 et C2-INS01), les types de tube en fonctions des examens demandés sont indiqués dans la liste des examens faits au laboratoire (annexe 1) et sur tableau synthétique en annexe de ce manuel. En cas de prélèvement sur différents types de tubes, l'ordre de prélèvement suivant doit être respecté :

BLEU → **(JAUNE)** → **ROUGE** → **VERT** → **VERT** → **VIOLET** et/ou **NOIR** → **GRIS**

Pour les prélèvements urinaires et autres que sanguins (C2-INS22), le tableau suivant liste les récipients, protocole ou sachets à fournir.

code	examen	récipient	à fournir
URINES			
CBU	Examen cyto-bactériologique urinaire	Flacon stérile 40 à 60 ml +/- tube/borate ou poche pédiatrique	Protocole ECBU Sachet double poche
CYTU	Hématurie, Leucocyturie,	Flacon stérile 40 à 60 ml	Sachet double poche
ADD	Compte d'Addis	Flacon de 500 ml	Protocole Addis
PARU	Parasitologie urinaire	Flacon stérile 40 à 60 ml	Sachet double poche
A S A+CREAL	albumine sur échantillon, glycosurie sur échantillon, Rapport albuminurie/créatininurie	Flacon stérile 40 à 60 ml	Sachet double poche
MI	Microalbuminurie échantillon à jeun	Flacon stérile 40 à 60 ml	Sachet double poche
MI+ CREMI	Rapport microalbuminurie/créatininurie Miction urinaire	Flacon stérile 40 à 60 ml	Sachet double poche
MI24	Microalbuminurie sur 24H	1 ou 2 Cantines	Protocole urines de 24 H
AI24	Albuminurie de 24H (protéinurie de 24 H)		
S24	Glycosurie de 24 H		
AUUR	Acide urique urinaire 24H		
KUR	Potassium urinaire		
NAUR	Sodium urinaire		
CLUR	Chlore urinaire (HN)		
CREU	Créatinine urinaire		
CLCR	Clearance à la créatinine (faire en sorte que recueil des urines juxte prise de sang)		
URU	Urée urinaire (HN)		
CAUR	calciurie	Cantine décalcifiée dûment étiquetée « avertissement ! cantine décalcifiée »	Protocole urines de 24 H

PUR	phosphorurie	Cantine décalcifiée dûment étiquetée « avertissement ! cantine décalcifiée »	Protocole urines de 24 H
SELLES			
COPR	coproculture	1 Flacon 100 ml avec spatule	Protocole spécifique
PARS PAR1-2-3	Parasitologie des selles	1 Flacon 100 ml avec spatule	Protocole spécifique
SGS1 SGS2 SGS3	Recherche de sang dans les selles	3 flacons 100 ml avec spatules	Protocole spécifique
SCO	Scoth-test	2 lames recouvertes de scotch dans boîte porte-lames identifiée	Protocole scotch- test + Sachet double-poche
SPERME <i>si possible voir biologiste pour explications et discrétion.</i>			
SPEC	SPERMOCULTURE	1 Flacon stérile 40 à 60 ml	Protocole spermoculture Sachet opaque
BACTERIOLOGIE/DIVERS			
PV PG...	Prélèvements bactériologiques divers apportés	Matériel fourni à la demande des médecins	Voir C2-MO 03
EXP	EXPECTORATION	Flacon stérile 100 ml	Protocole spécifique
SYN	Liquide articulaire (synovie) prélevé par le médecin	tubes EDTA ou héparinés	Boîte prélèvement

